

Blue 2

Maquina presoterapia portatil



IMPORTANTE

- 1) Por favor, lea el manual del usuario antes de cualquier operación.
 - 2) No coloque ningún líquido dentro de la máquina. Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
 - 3) Evitar las operaciones en las mujeres embarazadas o las personas con epilepsia, marcapasos o cualquier prescripción médica o psicológica grave, o infecciones en el área tratada.
 - 4) Por favor, el desarme o almaje del equipo solo será realizado por personal profesional. Por favor, compruebe si existe alguna mala conexión en el interior de la máquina cuando alguna función no funciona.
 - 5) Limpie y esterilice las piezas de repuesto después de cada operación.
- Tenga cuidado de las conexiones, revise los tubos sin que puedan ser doblados excesivamente.*

1, Principio y efectos


La presoterapia, es una serie de accesorios y 8 piezas de bolsas de aire, lo que permite la presión por ciclos, o todos juntos, tanto para todo el cuerpo, como para ciertas partes del cuerpo, es un sistema de compresión diseñada para aumentar el riego sanguíneo, flujo linfático y mejorar la depuración del líquido extracelular.

Puede ayudar a promover las funciones de compensación de toxinas naturales del cuerpo. La revitalización y la oxigenación de los tejidos, ayuda a adelgazar y redefinen las piernas, el estómago y los brazos al tiempo que mejora el tono de la piel.

Es muy recomendable para el tratamiento de la celulitis, que es una alternativa segura a la liposucción. Alivia el dolor y la inflamación, y proporciona un confort inmediato.

PANEL DE INSTRUMENTACION


Control por botones

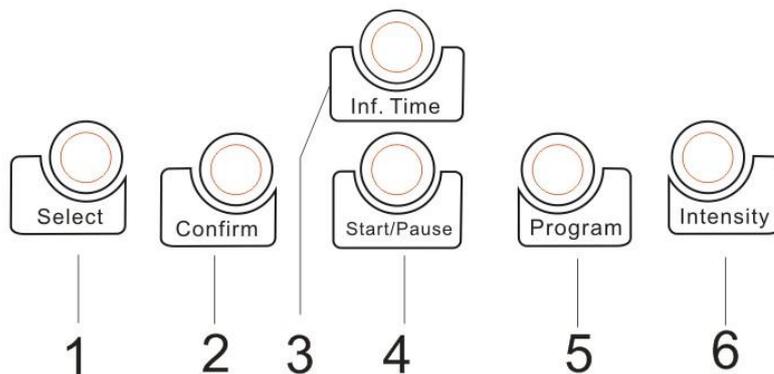

1. Selección de salida 2. Confirmar salida 3. seleccionar tiempo inflado

4. START/STOP 5. Seleccion de modo 6. Seleccion de intensidad

1) Pantalla LCD Display Indicación (interfaz comenzando por defecto)

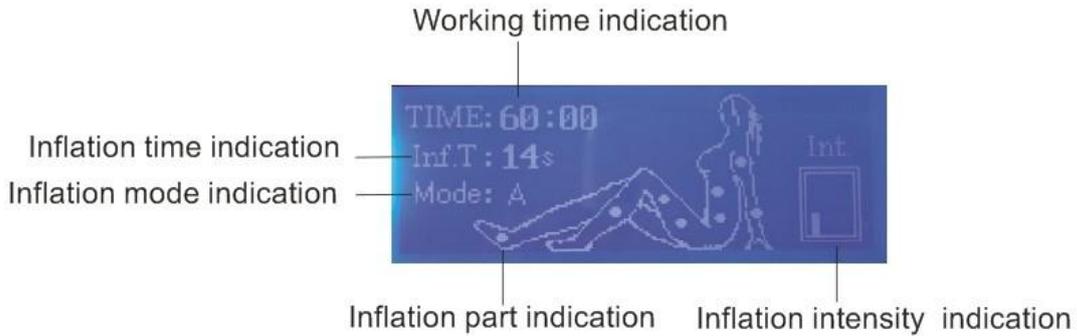

<i>Working time indication</i>	<i>Indicación del tiempo de trabajo</i>
<i>Inflammation time indication</i>	<i>Indicación de tiempo Inflado</i>
<i>Inflammation mode indication</i>	<i>Indicación modo Inflado</i>
<i>Inflammation part indication</i>	<i>Indicación parte Inflado</i>
<i>Inflammation intensity indication</i>	<i>Indicación intensidad inflado</i>

CONEXIONADOS

○,1 Conexion de traje



Salida de la maquina, numero 1 de la izquierda



The side with Arrow is upward
 Connect plug 1 into outlet 1
 Connect plug 2 into outlet 2

The side with arrow is upward	El lado con la flecha hacia arriba
Connect plug 1 into outlet 1	Conecte plug 1 a la salida 1
Connect plug 2 into outlet 2	Conecte plug 2 a la salida 2

○,2Conexionado de corriente



3, Operaciones a seguir

- 1) Conecte la fuente de alimentación, y encienda la máquina.
- 2) Pulse el botón "4" para iniciar la función, puede ajustar el tiempo y la intensidad y el modo de la inflación la inflación.
- 3) Seleccione el modo de la inflación

Hay 4 modos, y que corresponden a los diferentes airbags (1 a 8),

Modo A, se infla de 1 a 8, se desinfla 1 cuando se infla 2, y se desinfla 2 cuando se infla 3,,,, entonces se infla 1 a 8 juntos, y luego se repite el programa(**sucesivamente**)

Modo B, se infla de 1 a 8, se desinfla 1, se infla 3, y se desinfla 2 cuando se infla 4,,,, entonces se infla 1 a 8 juntos, y luego se repite el programa8(**aleatorios**)

Modo C, se infla de 1 a 8, que mantiene inflar 1 cuando se infla 2, e inflando 1 y 2 cuando se infla 3,,,, entonces se repite el programa(**aleatorios sucesivos**)

Modo D, se infla en 2 formas, al mismo tiempo, una forma es de 4 a 1, la otra forma es del 5 al 8, y entonces se repite (**aleatorios impares sucesivos**)

Seleccione airbag especial

Pulse el botón "1" para seleccionar (el airbag se vuelve sólido significa que se ha seleccionado) o negligencia (el airbag se vuelve hueco significa la bolsa correspondiente no está seleccionada), Pulse el botón "2" para confirmar.

AJUSTE DE TIEMPO

Pulse el botón **4**, ahora usted podrá ajustar el tiempo con los **botones 5-6**.

4, LISTA DE CONTENIDO

PRESOTERAPIA	Unit	Quantity	Remark
Ordenador central	set	1	
Airbags	set	1	
Conectores para aparatologia y maquina	set	1	
Fusible y cable de tensión	set	1	
Instrucciones	set	1	

5, Especificaciones tecnicas

Voltage	<input type="checkbox"/> 100-110V	<input type="checkbox"/> 220-240V		
Frequency	<input type="checkbox"/> 50HZ	<input type="checkbox"/> 60HZ	Power	100 W
Package	58*43*41CM		Gross Weight	15 KG